

7. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problemas	Possível razão	Solução
Oxihemoglobina ou frequência cardíaca não aparecem no display	1 - Dedo mal inserido. 2 - Perfusão do paciente é muito baixa para ser medida	1 - Tente inserir o dedo novamente
Oxihemoglobina ou frequência cardíaca é instável	1 - Dedo mal inserido 2 - O dedo esta tremendo ou o paciente está se movimentando	1 - Tente inserir o dedo novamente 2 - Acalme o paciente, e o mantenha imóvel
O oxímetro não liga	1 - Pilhas fracas 2 - Pilhas instalada incorretamente	1 - Use pilhas novas 2 - Reinstale as pilhas
O display desliga	1 - O oxímetro tem função de desligamento automático 2 - As pilhas estão fracas	1 - Normal 2. Use pilhas novas