

Problema	Provável Causa	O que Fazer
O nebulizador não funciona.	O plugue não está bem conectado à tomada.	Verifique a conexão do adaptador AC na tomada e/ou verifique se o plugue está conectado à porta AC do nebulizador
	Tipo de medicamento misturado inibe a formação de névoa.	Utilizar nebulizador mecânico a compressor.
Não há formação de névoa ou o fluxo está muito fraco.	Falta de energia elétrica.	Verifique se há energia elétrica na tomada.
	Falta solução no copinho para medicamento.	Inserir solução (máximo 5ml)
	Excesso de solução.	Retire o volume excedente.
	A mangueira de ar (traqueia) e/ou a máscara não está conectada corretamente	Verifique se a mangueira de ar (traqueia) está devidamente conectada no bico de saída da névoa do nebulizador e se a máscara está devidamente conectada à mangueira de ar (traqueia).
	A mangueira de ar (traqueia) está torcida ou esmagada	Desconecte a mangueira (traqueia) do bico de saída da névoa e estique a mangueira de modo a aliviar a passagem de ar. Em seguida reconecte a mangueira e volte a utilizar o aparelho normalmente

Não há formação de névoa ou o fluxo está muito fraco.	A água do reservatório da base do nebulizador está fora do nível indicado no manual	Desligue seu aparelho através do botão Liga/Desliga e corrija o nível de água conforme o friso indicador de nível
	Há dois copinhos para medicamento inseridos no dispositivo	Desligue seu aparelho através do botão Liga/Desliga e, retire o medicamento, desencaixe os copinhos para medicamento e utilize apenas um.
	Filtro de ar obstruído (entupido)	Troque-o por um novo
	O nebulizador está inclinado	Corrija a posição do aparelho nebulizador, colocando-o na posição horizontal
	Reservatório da base do nebulizador está sujo	Verifique se o reservatório está limpo. Caso haja alguma impureza, limpe-o com um papel toalha absorvente.