



PRODUCTS INSTRUCTIONS FOR USE

No. 1 Best Support Brace Seller on Amazon-Exclusive Design Patent of USA.

Gentili clienti,

Grazie per aver scelto questo prodotto NEENCA.

Il rispetto di rigorosi requisiti in materia di progettazione e di qualità della produzione, nonché la gestione altamente efficiente dei processi, consentono a NEENCA di fornire prodotti di qualità superiore a prezzi vantaggiosi per proteggere la vostra salute! Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni e di contattarci in caso di domande. Di seguito è riportato l'indirizzo e-mail del nostro servizio clienti specializzato:
outdoorports5@outlook.com

Metodo di applicazione:

Per indossarla: afferrare la struttura a forma di croce nella parte superiore dello stabilizzatore a molla laterale con l'indice e il medio e tirare lentamente verso l'alto fino a quando il centro del cuscinetto anulare al centro della ginocchia copre completamente la rotula. Come mostrato nelle Fig. 1 e 2.

Per rimuoverla: afferrare saldamente il simbolo della freccia alla base degli stabilizzatori a molla laterali, quindi tirare lentamente verso il basso finché la parte superiore della ginocchia non si stacca completamente dalla gamba.

Suggerimenti: non mettere la ginocchia alla rovescia, perché questo potrebbe causare la rottura degli stabilizzatori a molla laterali e comprometterne l'utilizzo.

Finalità:

Il prodotto viene applicato sulle ginocchia per fornire un buon supporto all'articolazione del ginocchio e ridurre la relativa pressione.

Conservazione:

Lavare a mano in acqua fredda. Non utilizzare detersivi o candeggina. Non allungare o strizzare. Asciugare all'aria e all'ombra.

Utilizzo:

1. Pratica di vari sport e passeggiate quotidiane;

2. Varie patologie dell'articolazione del ginocchio;

3. Recupero post-operatorio dell'articolazione del ginocchio;

4. Sollievo da diversi dolori articolari;

5. Altri scenari applicativi che richiedono la protezione dell'articolazione del ginocchio.

Avviso sui rischi:

1. Non indossare il prodotto mentre si dorme;
2. Controllare la tabella per selezionare la taglia e scegliere una taglia più grande se le gambe vengono compresse troppo. In caso contrario, può causare disturbi ai vasi sanguigni e ai nervi delle gambe;
3. Non modificare la struttura del prodotto senza autorizzazione; l'azienda non sarà responsabile delle conseguenze causate;
4. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare il medico se il dolore aumenta o provoca un fastidio insolito quando lo si indossa.

Dichiarazione di garanzia:

100% DI SODDISFAZIONE

GARANTITA

1. 30 giorni di garanzia di rimborso completo al 100% per QUALSIASI motivo!
 2. Garantiamo qualità e assistenza: la vostra soddisfazione è la nostra priorità!
 3. Garantiamo un servizio di assistenza clienti a vita per tutti i prodotti che offriamo!
- Nota:** Non ci assumiamo la responsabilità della garanzia nei seguenti casi:
 Modifica non autorizzata della struttura del prodotto;
 Danneggiamento del prodotto dovuto alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso;





NEENCA®

MODEL NO: HX048
MADE IN CHINA
US: NEENCA CO., LTD.
1800 CASTLETON ST.
STE 665 CITY OF INDUSTRY,
CA 91748

PO2209200185

2022/09

64% Nylon, 1% spandex, 14% polyester, 21% latex

LOT 0271048202209

RN#166882 REF: HX048AN



8 975511 520006

NEENCA[®]
KNEE BRACE



Sports Life
NEENCA
SPORTS PROTECTION SERIES
Get active embrace your sporting life



Design Patent & Professional Support