

Manual de Usuario – Collarín Cervical DiMedsion

Producto: Collarín cervical blando y ergonómico

Marca: DiMedsion

Modelo: Collarín transpirable para soporte y comodidad

1. Descripción del producto

El collarín cervical DiMedsion ha sido diseñado para **ofrecer un soporte suave al cuello y favorecer una postura correcta** en el día a día.

Su **estructura blanda y ergonómica** se adapta a la forma del cuello para mayor comodidad, mientras que el material transpirable permite un uso confortable durante periodos prolongados.

Este producto está destinado exclusivamente para **uso general y de apoyo ligero**. No es un dispositivo médico.

2. Contenido del paquete

- 1 collarín cervical blando DiMedsion (talla y color según pedido)
 - Manual de usuario básico (este documento)
-

3. Características principales

- **Diseño ergonómico:** se adapta a la anatomía del cuello para un ajuste cómodo.
 - **Material transpirable:** ayuda a mantener la frescura y reducir la acumulación de calor.
 - **Fácil ajuste:** sistema de cierre con velcro resistente y sencillo de manipular.
 - **Ligero y flexible:** ideal para uso diario.
 - **Variedad de tallas:** para adaptarse a diferentes medidas de cuello.
-

4. Instrucciones de uso

1. Comprobar la talla

- Mida el perímetro de su cuello y la altura desde la clavícula hasta la barbilla para confirmar la talla adecuada.

2. Colocación del collarín

- Coloque el collarín en la parte frontal del cuello con la curva hacia la barbilla.
- Ajuste el cierre de velcro en la parte posterior, asegurando que quede firme pero cómodo.
- El mentón debe descansar suavemente sobre la parte superior del collarín.

3. Uso diario

- Puede utilizarse durante actividades que requieran soporte ligero en el cuello o para mantener una postura más alineada.
- No es necesario un uso continuo: ajústelo según sus necesidades de comodidad.

4. Retirada

- Abra el velcro con cuidado y retire el collarín suavemente.
- Guárdelo en un lugar limpio y seco.

5. Mantenimiento y limpieza

- Lavar a mano con agua fría y jabón suave.
- No utilizar lejía ni detergentes abrasivos.
- Secar al aire libre, lejos de fuentes de calor o exposición directa al sol.
- No planchar ni retorcer.

6. Advertencias y seguridad

- Producto destinado únicamente a soporte ligero y uso general.
- No ajustar excesivamente para evitar incomodidad.
- Mantener fuera del alcance de niños pequeños sin supervisión adulta.
- Si siente cualquier molestia al usarlo, retire el collarín.