

Sicherheitsinformation

Produkt : Tageslichtlampe

ASIN : B07ZWWJPMR

SKU: TL-lampe-lumino

Marke : Top Life

Lesen Sie diese Sicherheitsinformationen sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf, stellen Sie sie anderen Benutzern zur Verfügung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Sicherheit, Kontraindikationen und Reparatur

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerät und das Zubehör frei von sichtbaren Schäden sind und dass sämtliches Verpackungsmaterial entfernt wurde. Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst (serviceclient@topliffe.fr).
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Lampe in einer stabilen Position verwenden.
- Das Gerät darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und verwenden Sie es nicht in feuchten Räumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei abhängigen Personen, Kindern unter 3 Jahren oder hitzeunempfindlichen Personen (Personen mit Hautveränderungen infolge einer Krankheit), nach der Einnahme von Schmerzmitteln, Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern (Erstickengefahr!).
- Im heißen Zustand darf das Gerät nicht abgedeckt oder eingewickelt werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Im eingesteckten Zustand darf das Gerät nicht mit nassen Händen angefasst werden; Es darf kein Spritzwasser auf das Gerät gelangen. Das Gerät darf nur im völlig trockenen Zustand verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Netzstecker nur mit trockenen Händen ein- und ausstecken und die EIN/AUS-Taste betätigen.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Gegenständen und offenen Flammen fern.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Stößen.
- Ziehen Sie den Netzadapter nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn eine dieser Situationen auftritt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es entsorgt werden.

TOP LIFE

- Eine Trennung vom Stromnetz ist nur gewährleistet, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Kombination aus brennbarem Anästhesiegas und Luft, Sauerstoff oder Stickoxiden.
- Für dieses Gerät sind keine Kalibrierung oder vorbeugende Prüfungen erforderlich.
- Sie können das Gerät nicht reparieren. Es enthält keine Teile, die Sie reparieren können.
- Nehmen Sie ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen am Gerät vor.
- Wenn das Gerät reparaturbedürftig ist, sollten grundlegende Tests und Kontrollen durchgeführt werden, um die sichere Verwendung des Geräts in der Zukunft zu gewährleisten.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen. Erstickungsgefahr.

Kontraindikationen


Diese Lampe strahlt intensives Licht aus. Seine Verwendung erfordert bestimmte Vorsichtsmaßnahmen:

- Für Menschen mit Netzhauterkrankungen wie z. B. Diabetiker empfiehlt es sich, vor der Verwendung der Lampe eine Untersuchung durch einen Augenarzt durchzuführen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht bei Augenerkrankungen wie Katarakt, Glaukom, Sehnervenerkrankungen im Allgemeinen und bei Entzündungen des Glaskörpers.
- Bei der Einnahme von Medikamenten wie Beruhigungsmitteln, blutdrucksenkenden Mitteln und Antidepressiva sollte hinsichtlich der Verwendung der Lampe der Rat des Arztes eingeholt werden.

Wenn Sie Zweifel an Ihrem Gesundheitszustand haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Reparatur

- Sie dürfen das Gerät nicht öffnen. Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen. Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.
- Wenden Sie sich für Reparaturen an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.

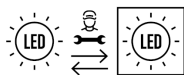

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Diese Lichtquelle (nur LED) kann von einem Fachmann ausgetauscht werden.

Reinigung und Wartung des Gerätes

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuseinnere eindringt
- Vor der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch.

- Im eingesteckten Zustand darf das Gerät nicht mit nassen Händen angefasst werden; Es darf kein Spritzwasser auf das Gerät gelangen. Das Gerät darf nur im völlig trockenen Zustand verwendet werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und nicht eintauchen Stellen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Lagerung und Entsorgung

Lagerung

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es vom Netz trennen und an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Beseitigung

Aus Gründen des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung muss über die zuständigen Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der europäischen Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, die für die Entsorgung und das Recycling dieser Produkte zuständig sind.

Nichtmedizinischer Zweck


Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Lampe nicht um ein medizinisches Gerät handelt. Es darf nur für nichtmedizinische Zwecke des Wohlbefindens verwendet werden.

Der Hersteller macht keine medizinischen Aussagen. Unter keinen Umständen darf diese Lampe zur medizinischen Behandlung einer diagnostizierten saisonalen Depression verwendet werden.

Wenn Sie glauben, an einer saisonalen Depression zu leiden, wenden Sie sich an Ihren Arzt und befolgen Sie dessen Empfehlungen, um eine angemessene medizinische Behandlung zu erhalten.

Einhaltung

Dieses Gerät entspricht allen geltenden Normen und Vorschriften hinsichtlich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern und der elektrischen Sicherheit.

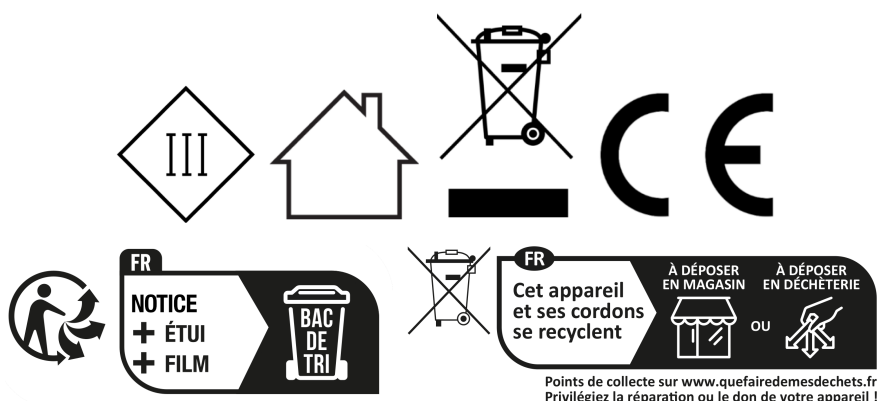

TOP LIFE

Hersteller und Verantwortlicher in der EU

Near Life Experience SAS • 983 chemin de verneuil, 71850 Charnay-Lès-Mâcon, Frankreich

• +33 (0) 9 77 19 86 14 • serviceclient@toplif.fr