

Caremax
FICHE TECHNIQUE ET DE SPECIFICATIONS

URGO PANSEMENT TATTOO

DESCRIPTION:

Le produit est un pansement imprimé (25 x 72 mm) emballé dans une boîte en carton pliante :

- 4 pansements avec un dessin de lion
- 4 pansements avec un dessin de girafe

Ce pansement est d'origine synthétique.

Les pansements sont prédécoupés.

PROPRIETES:

Résistant à l'eau, ne colle pas à la plaie.

INDICATIONS:

Pansements prédécoupés pour la protection des plaies superficielles.

Résistant à l'eau, ne colle pas à la plaie.

MODE D'EMPLOI:

• Mode d'application

Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher délicatement la plaie et son pourtour. Appliquer le pansement en lissant soigneusement les bords.

• Fréquence de changement

A renouveler au moins deux fois par jour.

Usage unique.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans

Mise en garde

- Ne pas utiliser si le paquet est endommagé ou si la date de péremption est dépassée.

Contre-indications

- Ne pas utiliser en cas d'effets indésirables, tels que des irritations de la peau et dans ce cas consulter un médecin immédiatement.

CONDITIONS DE CONSERVATION:

Péremption : 5 ans

A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.

DONNEES TECHNIQUES:

NATURE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
POUVOIR ADHESIF N/cm	2572CT-Z 2.69 2572CT-Y 2.63
DIMENSIONS	conform
VISUEL	conform
LOT DE COMPRESSES UTILISÉ	Neutral pad 2.4cm:HB93/190516 2.4cm:HB93/190404
TAMC	<10 cfu/g
PEREMPTION	5 ans

STATUT REGLEMENTAIRE:

En Union Européenne : « URGO pansement TATTOO » est un dispositif médical, marqué CE (Classe I).

Laboratoires URGO HEALTHCARE - 21300 CHENOVE - FRANCE