



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDE EL PROSPECTO PARA FUTURA REFERENCIA.

Solución Única pemag PLUS

INDICACIONES: Para limpiar, desinfectar y eliminar las proteínas diariamente, siga los siguientes pasos.

PASO 1: Ponga 3 gotas de solución única Pemag Plus en cada cara de la lente de contacto y frote suavemente durante 20 segundos.

PASO 2: Aclare minuciosamente cada cara de la lente durante 5 segundos con la solución única Pemag Plus.

PASO 3: Ponga la lente de contacto limpia en el estuche y llénelo con solución única Pemag Plus nueva. Manténgalas en remojo durante un mínimo de 4 horas. Recuerde utilizar siempre solución fresca – no reutilice la solución.

Sus lentes están listas para ser usadas. No necesita aclarar con solución salina. Si hay depósitos sobre las lentes de contacto, aclare con Pemag Plus solución única antes de ponérselas.

Siga siempre las instrucciones de su profesional del cuidado de la visión. Basándose en su calidad lagrimal y el uso que hace de las lentes de contacto su profesional podría recomendarle productos adicionales o diferentes procedimientos.

CONSERVACIÓN: Podrá guardar sus lentes en el estuche sin abrir hasta el momento de uso o hasta un máximo de 30 días.

Contenido: Hidroxialquil-fosfonato 0,03%, ácido bórico, edetato disódico, poloxamina 1%, borato sódico y cloruro sódico; conservada con poliaminopropil biguanida 0,0001%.

ACCIÓN: Limpia, desprende y elimina de las lentes de contacto blandas restos de película lagrimal, proteínas, otros depósitos y residuos. Destruye los microorganismos nocivos que hay en la superficie de la lente. Aclara, conserva y humecta las lentes antes de utilizarlas.

INDICACIONES (Usos): La solución única Pemag Plus está indicada para la limpieza diaria, la eliminación de depósitos de proteínas, el aclarado, la desinfección química (no por calor) y la conservación de las lentes de contacto blandas (hidrófilas) según la recomendación del profesional de la visión.

CONTRAINDICACIONES (Razones para no usar el producto): No use el producto si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.

PRECAUCIONES: PROBLEMAS CON LAS LENTES DE CONTACTO Y SUS SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO PUEDEN DESENCADENAR EN UNA INFECCIÓN CORNEAL Y/O ÚLCERA Y PROVOCAR UNA PÉRDIDA DE VISIÓN. Es esencial seguir los pasos indicados en las instrucciones para un uso adecuado de las lentes de contacto y las soluciones de mantenimiento, incluido el estuche portales. Problemas oculares, úlceras corneales incluidas, pueden desencadenar rápidamente en una pérdida de visión. Las lentes de contacto para uso diario no están indicadas para uso prolongado y no deben ser utilizadas mientras duerme. Estudios clínicos han demostrado el incremento del riesgo de sufrir reacciones adversas cuando las lentes se utilizan mientras se duerme. Las lentes de contacto para uso prolongado deben ser extraídas regularmente para su limpieza y desinfección o para desecharse siguiendo las indicaciones de reemplazo de su profesional del cuidado de la visión. Estudios clínicos han demostrado el incremento en la incidencia de reacciones adversas graves en usuarios de lentes de contacto en uso prolongado comparado con usuarios de lentes en uso diario.

Los estudios también han demostrado el aumento del riesgo de sufrir reacciones adversas graves usando las lentes en régimen de uso prolongado antes de ser extraídas para su limpieza y desinfección o para ser desechadas y reemplazadas. También se ha demostrado que los fumadores tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones. Si experimenta incomodidad, lagrimeo excesivo, cambios visuales, ojo rojo, deseche inmediatamente sus lentes y acuda a visitar a su profesional del cuidado de la visión. Es recomendable que los usuarios de lentes de contacto en régimen de uso prolongado visiten a su profesional dos veces al año, o más frecuentemente si fuese necesario.

El estuche portales debe llenarse de solución fresca cada vez que se guarden las lentes de contacto sin "añadir" a la solución anterior ni reutilizarla. Tire la solución nada más sacar las lentes del estuche. Evite que las lentes entren en contacto con agua y no conserve ni las lentes ni el estuche en agua, ya sea del grifo, embotellada o destilada, ni con ninguna solución que no sea estéril.

Vacíe el estuche portales y luego límpielo y enjuéguelo con solución única Pemag Plus. Deje secar el estuche al aire cada vez que saque las lentes de contacto. Para eliminar el exceso de solución, ponga el estuche boca abajo mientras se seca al aire. Cambie de estuche todos los meses.

Advertencia: No tirar la solución del estuche portales después de cada uso o usar agua para limpiarlas podría causar contaminación, producir una lesión ocular e incluso una posible pérdida de la visión. Para más información importante sobre seguridad, vea las instrucciones que se incluyen.

PRECAUCIONES:

- Siga siempre las instrucciones de uso del producto. Si incumplimiento podría causar pérdida de la visión.
- Acuda periódicamente a su profesional de la visión.
- Lávese y séquese siempre las manos antes de manipular las lentes.
- No use agua del grifo, embotellada, ni saliva en las lentes o el estuche.
- Use únicamente solución fresca para limpiar y desinfectar las lentes.
- Tras el ciclo de desinfección, tire siempre cualquier solución que quede en el estuche.
- Ni la solución salina ni las gotas humectantes (lágrima artificial) desinfectan las lentes de contacto.
- Cambie siempre la solución o las lentes según se le indique.
- Cambie mensualmente el estuche de las lentes.
- A fin de evitar la contaminación de la solución, no ponga en contacto la boca de la botella con ninguna superficie. Vuelva a poner el tapón después de su uso.
- No utilice ninguna medicación conjuntamente con esta solución sin supervisión médica.
- No debe usarse para desinfección por calor (térmica).
- Guarde el frasco bien cerrado cuando no lo use.
- Úselo antes de la fecha de caducidad que se indica en el envase y el frasco.
- Tire toda la solución restante antes de que pasen 90 días desde que la abrió.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- Consérvela a temperatura ambiente.

IMPORTANTE: Si siente irritación o se produce lagrimeo excesivo, y si estos síntomas persisten o aumentan, o si le afecta a la visión, deje de utilizar las lentes y consulte cuanto antes al profesional del cuidado de la visión.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2018-07

CE 0050

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman St.
Rochester, NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Ireland

STERILE A



Fabricado en Italia/Fabricado en Italia
PEMAG es una marca de Bausch & Lomb Incorporated o de sus filiales
PEMAG é uma marca da Bausch & Lomb Incorporated o das suas filiais
© Pemag Plus

154082474W P1ESPT01



LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE ESTE FOLHETO PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Solução Única pemag PLUS

INSTRUÇÕES: Para limpar, desinfectar e eliminar proteínas diariamente, siga estes simples passos.

PASSO 1: Coloque 3 gotas da solução única Pemag Plus em cada lado da superfície da lente e esfregue suavemente durante 20 segundos.

PASSO 2: Lave cuidadosamente cada lado das lentes durante 5 segundos com a solução única Pemag Plus.

PASSO 3: Coloque as lentes limpas no estojo e encha com solução única Pemag Plus. Deixe em imersão pelo menos 4 horas. Utilize sempre solução nova.

As suas lentes estão prontas para serem usadas. Não é necessário o enxaguamento com solução salina. Se ficarem resíduos nas lentes de contacto, enxague as lentes com solução única Pemag Plus antes de as colocar.

Siga sempre as instruções do oftalmologista. Com base na composição química individual das suas lágrimas e o período de utilização das lentes, o oftalmologista pode recomendar produtos e procedimentos adicionais.

ARMAZENAMENTO: Pode guardar as suas lentes num estojo por abrir até que estejam prontas para utilizar, até um máximo de 30 dias.

CONTEÚDO: Hidroxialquilfosfonato 0,03%, ácido bórico, edetato dissódico, poloxamina 1%, borato de sódio e cloreto de sódio; conservado com poliaminopropil biguanida 0,0001%.

AÇÃO: Limpa, solta e elimina acumulações de películas, proteínas, outros depósitos e resíduos de lentes de contacto flexíveis. Destroi microorganismos nocivos na superfície da lente. Lava, conserva e lubrifica.

INDICAÇÕES: A Solução Única Pemag Plus é indicada para utilização na limpeza diária, eliminação de depósitos de proteínas, enxaguamento, desinfeção química (sem calor) e armazenamento de lentes de contacto flexíveis (hidrófilas), conforme recomendado pelo seu oftalmologista.

CONTRA-INDICAÇÕES: Se tiver alergia a qualquer ingrediente do produto, não utilize.

AVISOS: OS PROBLEMAS COM LENTES DE CONTACTO E PRODUTOS DE CUIDADOS DE LENTES PODEM RESULTAR EM INFECCÕES DA CORNEA E/OU ÚLCERAS E CAUSAR A PERDA DE VISÃO. É essencial que siga todas as instruções nas etiquetas relativamente à utilização correta das lentes e dos produtos de cuidado das lentes, incluindo o estojo das lentes.

Os problemas nos olhos, incluindo úlceras da córnea podem desenvolver-se rapidamente e levar à perda de visão. As lentes de utilização diária não são indicadas para a utilização durante a noite e não devem ser usadas ao dormir. Os estudos clínicos mostram que o risco de reações adversas graves aumenta quando as lentes são usadas durante a noite. As lentes de utilização prolongada devem ser retiradas regularmente para serem limpas e desinfectadas ou para serem eliminadas e substituídas conforme o programa prescrito pelo oftalmologista. Os estudos clínicos mostram que existe uma maior incidência de reações adversas graves nos utilizadores de lentes de contacto de utilização prolongada em comparações com os utilizadores de lentes de contacto diárias.

Os estudos também mostram que o risco de reações adversas graves aumenta quanto mais tempo as lentes de utilização prolongada forem utilizadas, antes de serem retiradas para limpeza e desinfeção ou para a eliminação e substituição. Os estudos também mostram que os fumadores têm uma maior incidência de reações adversas. Se sentir desconforto nos olhos, excesso de lágrimas, alterações da visão, olhos vermelhos, retire imediatamente as lentes e contacte imediatamente o oftalmologista. Recomenda-se que os utilizadores de lentes de contacto consultem o oftalmologista duas vezes por ano ou, se for indicado, mais frequentemente.

Deve encher o estojo das lentes com solução fresca sempre que guarda as lentes e nunca "reacessar" nem re-utilizar solução. Deve eliminar a solução imediatamente após as lentes terem sido retiradas do estojo das lentes. Não deve expor nem guardar as lentes em água, nem deve enxaguar o estojo das lentes com água da torneira, engarrafada ou destilada, ou com qualquer solução não estéril.

Esvazie e, de seguida, limpe e enxague o estojo das lentes com a solução única Pemag Plus. Seque o estojo das lentes ao ar sempre que retirar as lentes. Para eliminar o excesso de solução, pode virar o estojo das lentes ao contrário enquanto o seca. Substitua mensalmente o seu estojo das lentes.

Aviso: Não eliminar a solução do estojo das lentes após cada utilização, ou se utilizar água para cuidar das suas lentes, pode causar contaminações que podem resultar em danos nos olhos e potencial perda de visão. Consulte as importantes informações de segurança adicionais nas instruções em anexo.

PRECAUÇÕES:

- Siga as instruções de utilização do produto. A falha do cumprimento das instruções do produto pode conduzir a perda de visão
- Consulte o seu oftalmologista regularmente.
- Lave e seque as mãos antes de manusear as lentes.
- Não use água da torneira, engarrafada ou saliva com lentes ou com o estojo das lentes.
- Use apenas solução fresca para limpar e desinfectar as lentes de contacto.
- Descarte sempre qualquer solução restante no estojo das lentes após cada ciclo de desinfeção.
- Salina ou gotas de re-humectamento não desinfectam as lentes.
- Substitua sempre as soluções e lentes conforme indicado.
- Substitua sempre o seu estojo das lentes mensalmente.
- Para evitar a contaminação, não encoste a ponta do recipiente a qualquer superfície. Coloque a tampa após cada utilização.
- Não utilize medicação para os olhos em conjunto com esta solução, excepto sob vigilância médica.
- Não é adequado para utilização com desinfeção por calor (térmica).
- Mantenha o frasco fechado quando não está a ser utilizado.
- Utilize antes da data de validade indicada na caixa e na embalagem
- Deite fora a solução restante, 90 dias depois da abertura
- Mantenha fora do alcance das crianças
- Guarde à temperatura ambiente

IMPORTANTE: Se ocorrer, persistir ou aumentar irritação ou excesso de lágrima, ou se a visão for prejudicada, interrompa a utilização e consulte imediatamente o seu oftalmologista.

Data de emissão: 2018-07

154082474W P1ESPT01