



Nasensekret-Sauger

🇸🇪 Made in Sweden



Hilfe bei Schnupfen und Erkältung
von Kleinkindern

Erleichtert Kindern das Atmen, Schlafen
und Essen während einer Erkältung

Sanft, sicher und hygienisch
Klinisch getestet



Rotho Babydesign - Im Schachen 212 - 66687 Wadern

Kinder unter drei Jahren können sich nicht schnäuzen, wenn Sie erkältet sind. Eine verstopfte Nase stört den Schlaf des Kindes und seine Nahrungsaufnahme. Dies wirkt sich negativ auf die familiäre Situation aus. Ein effizienter Nasensekretsauger, sicher und hygienisch in der Anwendung, schafft hier Abhilfe. Er befreit die Nase von zähem Schleim, ohne die Schleimhäute zu beschädigen oder sie auszutrocknen.

Nosefrida® wurde von Ärzten an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Universitätskrankenhauses MAS in Malmö entwickelt und genügt sämtlichen Anforderungen, die sich an einen Nasensekretsauger für Kinder und an Mehrfachverwendung stellen lassen.



Eine klinische Studie verdeutlicht die Wirksamkeit des Nosefrida® Nasensekret-Saugers.

43 Kinder nahmen an der Studie teil - 17 Mädchen und 26 Jungen



Bei 96 % (24 von 25) der Kinder mit Essschwierigkeiten trat eine Verbesserung ein.



Bei 86 % (36 von 42) der Kinder reduzierte sich die Sekretstagnation, und die Verstopfung der Nase ging zurück.



Bei 80 % (32 von 40) der Kinder mit Schlafstörungen trat eine Verbesserung ein.



Bei 88 % (21 von 24) der Kinder verbesserte sich die Wirkung von Nasentropfen.

Sie erhalten Nosefrida® in Apotheken, Babyfachgeschäften, sowie im Internet- und Versandhandel. PZN Nr.: 7779883

Mehr Informationen finden Sie unter www.rotho-babydesign.com



Anwendung von Nosefrida®

Zuerst legen Sie Ihr Baby in eine angenehme Position. Legen Sie die Öffnung des Saugröhrchens an die Nasenöffnung des Kindes an. Die Öffnung ist extra groß gewählt, damit Sie das Röhrchen nicht in die Nase hineinschieben können (Verletzungsgefahr). Nun saugen Sie mit gleichmäßigen Atemzügen den Schleim aus der Nase. Keine Angst, Dank des Hygienefilters im Röhrchen können die Bakterien nicht übertragen werden. Es besteht also keine Ansteckungsgefahr!



Reinigung von Nosefrida®

Nach jedem Gebrauch reinigen Sie den Nasensekretsauger einfach mit warmem Seifenwasser. Der Hygienefilter gewährleistet eine hygienische Anwendung des Nosefrida® Nasensekret-Saugers. Er sollte 1 x am Tag ausgetauscht und entsorgt werden.

Patentiertes und FDA registriertes Produkt

Hersteller: Nasalprodukter Sverige AB - Schweden - www.nasalprodukter.se

Vertrieb: Rotho Babydesign - Im Schachen 212 - D-66687 Wadern

Tel.: 06874 18693-0